


検査の手順

お問い合わせの際には、「検査 ID (9 ケタ)」が必要になります。

同封のチャック袋に記載された検査 ID を下記に控え、
結果がお手元に届くまで、本書は大切に保管してください。



■キット内容物■

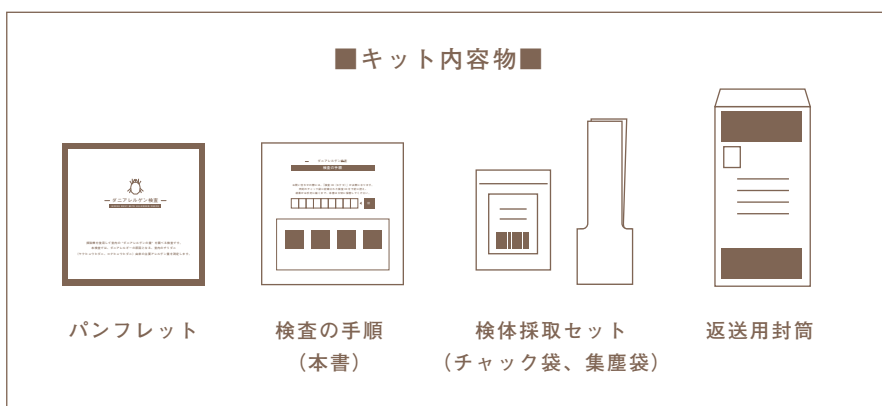

QA02_a

1 普段のお掃除前に検査をしてください。

寝具の洗濯や部屋の掃除機がけなど、普段のお掃除の前の状態で検査することをおすすめします。

2 アレルギーのある方は、必ずマスクや手袋をしてハウスダストを採取してください。

このダニアレルゲン検査は、「ハウスダスト」を集めていただく検査です。アレルギー症状の心配がある方は、必ずマスクや手袋を着用するなどの対策をした上で採取してください。

※本検査でのハウスダストの採取は、自己責任でお願いいたします。万が一、採取の途中でお身体に異常を感じた場合は、すみやかに採取を中止し医師へご相談ください。

3 集塵袋と掃除機は、本書(検査の手順)の記載を守ってお使いください。

集塵袋をセットしたまま長時間掃除機を使用すると、掃除機に負荷がかかり、故障の原因となる恐れがあります。

※本検査による掃除機の故障等については責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

2 検査のお申し込み

1 検査の結果は、「カラダのものさし」ウェブサイトのマイページ上でお返しいたします。

検査を受ける方は、下記のいずれかの方法でマイページにご登録ください。

A

QRコードの読み込み




B

下記 URL で検索

<https://new.karadacheck.com/r/req/QA>

2 マイページから検査に必要な情報を入力してください。

検査申込のページからアンケートに回答いただき、検査申込を完了させてください。

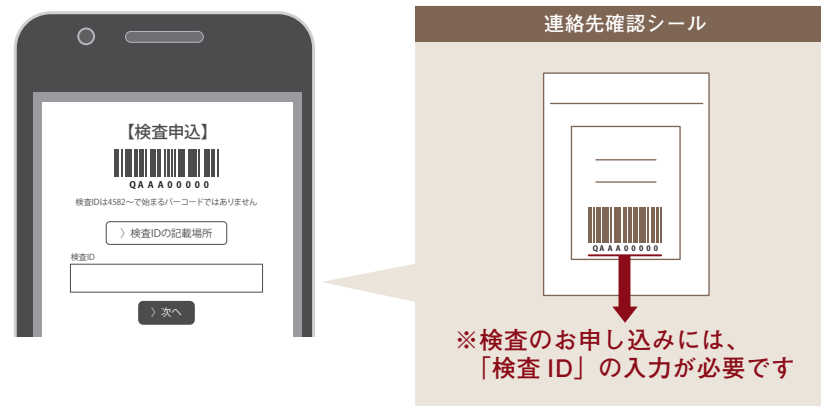

※検査のお申し込みには、「検査 ID」の入力が必要です

検体採取セットのチャック袋に貼ってある「連絡先確認シール」に、氏名、電話番号を記載してください。


ハウスダストの採取の仕方は裏面へ ▶▶▶

3 ハウスダストの採取


1 掃除機のノズルに集塵袋をセットしてください。



集塵袋を取り出し、口をあける

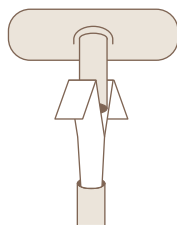

ヘッド側のノズルにかぶせ、本体側のホースへ入れ込む

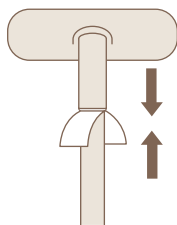

集塵袋を挟みこんだ状態で連結する

2 敷布団・掛け布団に掃除機をかけてください。

寝具のシーツをめくり、敷布団・掛け布団について、それぞれ約 1 m²の範囲を約 30 秒間、掃除機をかけてください。


掃除機がけの注意事項

掃除機に負荷がかかりますので、下記を必ず守ってください。

- ・掃除機の強さは「中」以下にする
- ・集塵袋をセットしたまま長時間の吸引を行わない

4 投函


1 集塵袋を取り外し、チャック袋に戻してください。

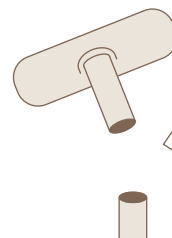

集塵袋をノズルから取り外す



ハウスダストが足りない場合は、再度③-2を行う
(※2回以上は不要)

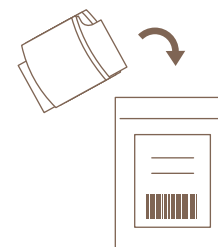


集塵袋を元のように折り畳みチャック袋に戻してしっかりとチャックを閉じる

2 返送用封筒に入れ、ポストに投函してください。

検査の進行状況や検査結果はマイページでご確認いただけます。

※検査結果までの目安：検体到着から約 1 週間

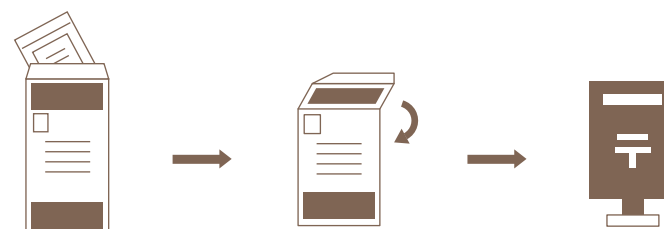


5 こんなときは

掃除機に集塵袋をセットできない

- ・掃除機のダストボックスのゴミを捨て、ハウスダストがない状態にしてください（可能であれば、水洗い後にしっかりと乾燥させてください）。
- ・約 1 m²の範囲を約 30 秒間、掃除機をかけてください。

- ・チャック袋から集塵袋を取り出し、採取できたハウスダスト・ゴミのすべてをチャック袋に直接入れてください。

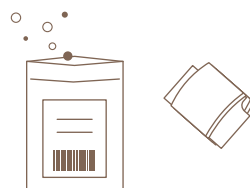

- ・ハウスダスト・ゴミ入りのチャック袋と未使用の集塵袋を返送用封筒に入れて、ポストに投函してください。



寝具以外からハウスダストを採取したい

寝具以外から採取したハウスダストも検査が可能です。

寝具の場合と同様に、「掃除機がけの注意事項」をよく読み、検査したい場所の約 1 m²の範囲を約 30 秒間掃除機がけし、ハウスダストを採取してください。



ハウスダストの採取方法や、その他検査に関してご不明な点がありましたら、右記 OR コードよりお問い合わせください。

