

# ウロリチンAの産生量を調べる尿検査です

最初に必ずお読みください

リペアチェック

検査の手順

キット内容物

- ・ウロリチン検査について
- ・検査の手順(本書)
- ・採尿キット
- ・返送用封筒


結果がお手元に届くまで、この用紙は大切に保管してください

検査を行う前に、必ずキットの中の「検査の手順」をよく読み、正しくご利用ください

— ご自宅からカンタン郵送検査 —

- 1 検査申込
- 2 自宅で採取
- 3 ポストに投函

— 結果サンプル —

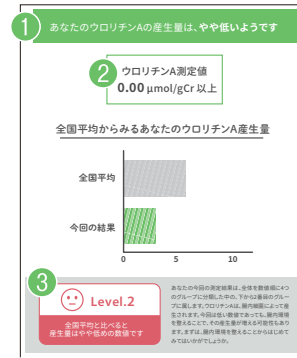

- 1 ウロリチンAの産生量について
- 2 検出されたウロリチンA値の詳細
- 3 測定値のレベル判定

キット内容物

ウロリチン検査について  
検査の手順(本書)  
採尿キット  
返送用封筒

ご注意

ウロリチン検査は、生活習慣を見直すためのヘルスケアチェックです。  
病気の診断をするものではありませんのでご注意ください。

↑結果画面イメージ

【販売元】株式会社ヘルスケアシステムズ  
〒466-0058  
愛知県名古屋市長区白金一丁目14番18号

<https://karadano-monosashi.jp>

カラダのものさし

ケース:PET シール:PET 説明書類



## 目次

## 1 採尿の前に

下記をよくご確認の上、採尿してください。

1. 採尿の前に
2. 検査のお申し込み
3. 採尿
4. 投函

オススメ

朝一番の尿

※一番濃い状態で採尿

オススメ

中間尿

※尿の始めと終わりは採らない

NG

生理中

※血液が混じらないように

NG

大型連休

※検査施設で受け取れません

## 2 検査のお申し込み

### 1 検査の結果は、「カラダのものさし」ウェブサイトのマイページ上でお返しいたします

検査を受ける方は、下記のいずれかの方法でマイページにご登録ください。

A

QRコードの読み込み



B

下記 URL で検索

<https://new.karadacheck.com/r/req/AG>

### 2 マイページから検査に必要な情報を入力してください




検査申込のページからアンケートに回答いただき、検査申込を完了させてください。



※検査のお申し込みには、「検査ID」の入力が必要です


## 3 採尿

1.

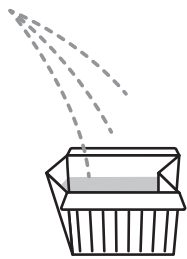

・採尿カップへ採尿します

2.

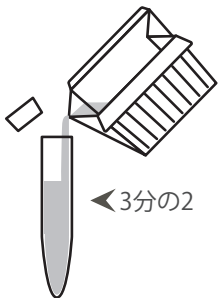

・尿を入れます  
※容器の3分の2を目安に採尿ください

3.



・ふたをしっかり閉めます  
・残った尿はトイレに流し、採尿カップは汚物入れ等に捨ててください  
※採尿カップをトイレに流さないでください

## 4 投函

1




採取した検体を提出用のチャック付ビニール袋に入れて口をしっかりと閉めます

2



1のビニール袋を返送用封筒に入れ、封を閉じます  
※投函前に、必ず採尿容器のシールに記載された「検査ID(9ケタ)」を下記に控え、お手元に保管してください

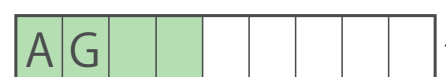

3



ポストへ投函します

※結果返却の目安:約2週間